

## Technik

Ein Fini MedicAir-Verdichter ist benutzerfreundlich und produziert garantiert saubere Druckluft.


Der exklusive Adsorptionstrockner mit zwei Behältern gewährleistet unter jeglichen Gebrauchsbedingungen trockene Druckluft. Der Arbeitszyklus des Trockners hat eine Dauer von etwa 5 Minuten, wobei einer der beiden Behälter adsorbiert und demzufolge den mit der Druckluft beförderten Wasserdampf zurückhält, während sich der andere Behälter in der Regenerationsphase befindet und dabei die gesammelte Feuchtigkeit über das Magnetventil ablässt.

## Technologie

*Un compresseur Fini MedicAir réunit la simplicité d'utilisation et la sécurité de délivrer un air comprimé exempt d'impuretés.*

*Le sécheur exclusif à adsorption à double colonne garantit, en toutes conditions, un air sec exempt d'humidité. Le cycle de travail du sécheur est d'environ 5 minutes pendant lesquelles la colonne en phase active retient la vapeur d'air présente dans l'air comprimé tandis que la seconde qui se trouve en phase de régénération décharge l'humidité qu'elle contient grâce à une électrovanne.*

*Un temporisateur inverse séquentiellement le cycle.*

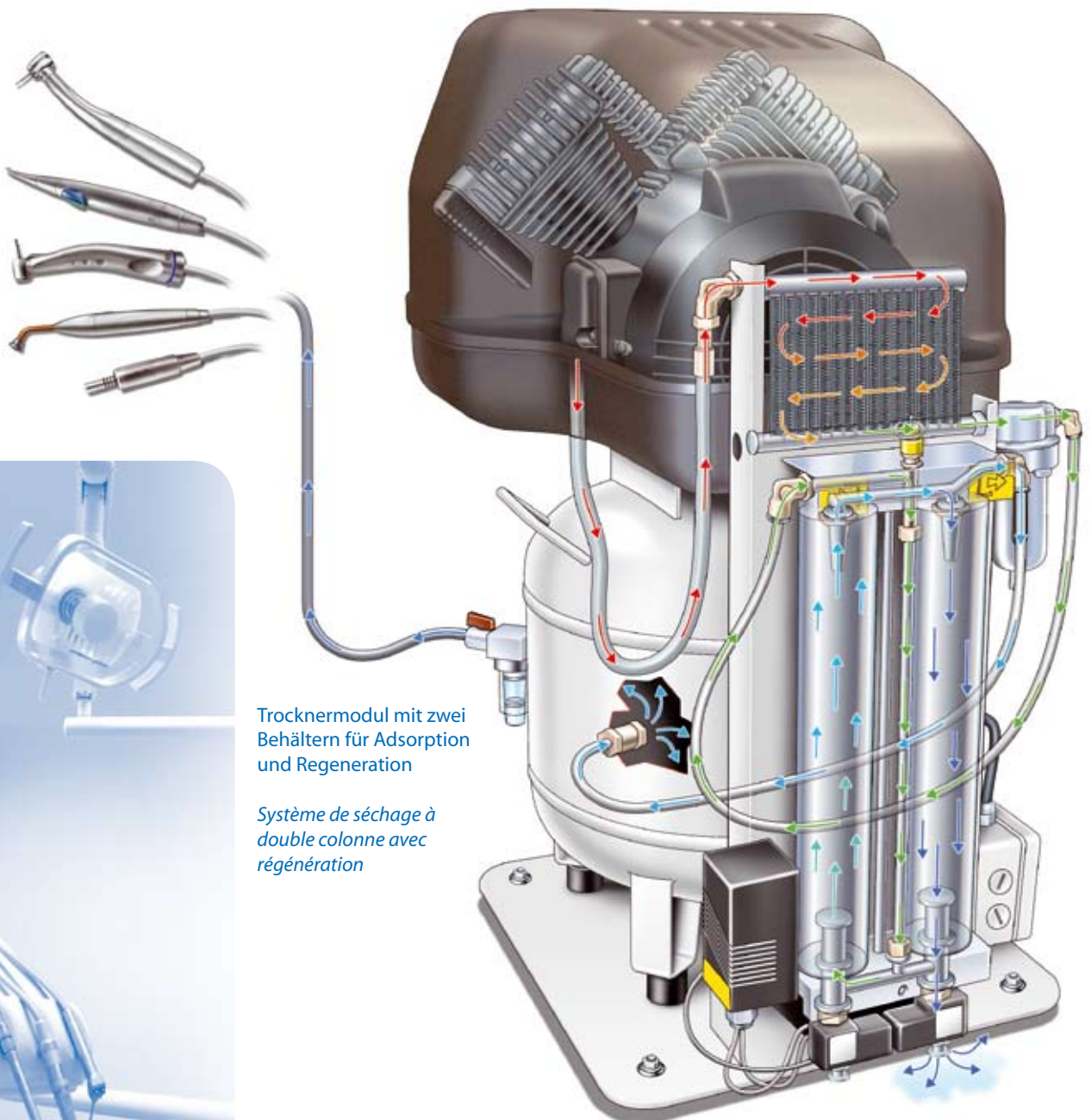

Trocknermodul mit zwei Behältern für Adsorption und Regeneration

*Système de séchage à double colonne avec régénération*